

Hvordan virker den?

Hvordan bruger man den?



Fjern den oprindelige hætte, der fulgte med din insulinpen og erstat den med **Timesulin**® hættten, efter din næste injektion.

Timesulin® "timeren" starter tidstælling og vil vise den tid der er gået siden den sidste injektion. Timesulin® "timeren" vil kun nulstilles, når den har været fjernet fra insulinpennen i mere end 8 sekunder (dette tillader dig at lave et hurtigt tjek på insulin niveauet i din pen på din vej ud til middag for eksempel) uden at nulstille timeren.

Sådan læses Displayet:

Ved daglig brug, viser Timesulin® hvor lang tid der er gået siden den sidste injektion.

I den første time viser displayet, hvor mange minutter og sekunder der er gået i dette format: MM: SS.

Du vil vide, at du kigger på MM: SS hvis du ser sekunderne tælle op.

Efter 60 minutter vil timeren automatisk skifte til at vise, hvor mange timer og minutter der er gået i dette format: TT: MM

Timeren tæller op til 99 timer og 59 minutter.



Batteriikonet vises og blinker for at indikere, at batteriet er lavt, efter cirka 12 måneders uafbrudt brug. Når ikonet blinker vil din Timesulin® hætte fortsat fungere i cirka én måned, før du kører tør for batteri, og hættten skal udskiftes.

Hvis du har flere spørgsmål om, hvordan Timesulin® virker er du velkommen til at kontakte os. info@flyingnurses.dk eller 2940 3920

OBS: Fjern ALTID den brugte kanyle efter hver indsprøjtning og læg insulinpennen væk UDEN kanyle for at sikre, at der ikke drypper insulin ned i Timesulin hættten.